



BEDIENUNGSANLEITUNG



IHR PARTNER BEI THERAPIE UND PROPHYLAXE

I. EINLEITUNG

Das SLK Chair®-Sitzkissen ist ein Wechseldrucksystem, das aus 6 luftgefüllten Kissen besteht.

Sitzenden Patienten mit Dekubitusrisiko sichert dieses System eine komfortable Unterlage.

Das SLK Chair®-Sitzkissen ist zur Benutzung auf Stühlen (z.B. Rollstühle, Reha-Stühle, Toilettenstühle etc.) gedacht.

Die Aufstellung und die Bedienung des SLK Chair®-Sitzkissens sind bewusst einfach konstruiert und bedürfen keiner besonderen Einweisung.

Das SLK Chair®-Sitzkissen lässt sich leicht pflegen bzw. reinigen und ist daher sehr anwenderfreundlich.

2. AUFSTELLUNG

Legen Sie das SLK Chair® Sitzkissen auf den vorgesehenen Stuhl.

Das SLK Chair®-Aggregat kann mit Hilfe der Aufhängevorrichtung beliebig fixiert werden.

Schieben Sie nun die Luftzufuhrschläuche auf das SLK Chair®-Aggregat, bis das Anschlussstück einrastet.

Sorgen Sie dafür, dass die Schläuche nicht verdreht oder abgeknickt sind (häufigste Ursache für Systemausfälle).

Schließen Sie das Netzkabel an.

3. INBETRIEBNAHME

Stellen Sie den EIN-AUS-Schalter auf EIN.

Nun leuchtet die EIN-Anzeigelampe auf der Vorderseite des Aggregates.

Die Druckeinstellung nehmen Sie entsprechend der Beschriftung auf der Frontseite des Aggregates vor.

Bei der von SLK® empfohlenen Druckeinstellung wurden Patienten mit durchschnittlich anatomischen Verhältnissen berücksichtigt.

Allgemein gilt:

Der Druck muss so eingestellt werden, dass ein Aufsitzen des Patienten auf dem Schaumstoff verhindert wird.

4. REINIGUNG

Die folgenden Richtlinien sind unter Berücksichtigung der Verfahren zur Infektionskontrolle ausgearbeitet worden.

SLK Chair®-Sitzkissen, Aggregat und Luftzufuhrschläuche sollten einmal wöchentlich mit einem weichen, feuchten Tuch gesäubert werden. Das Aggregat und das SLK Chair®-Sitzkissen können mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln abgewischt werden.

Vor jedem Patientenwechsel und bei besonders starker Verschmutzung sollte das SLK Chair®-Sitzkissen in unserem SLK®-Hygiene Center chemothermisch aufbereitet und fachgerecht überprüft werden.

Bei starker Verschmutzung oder Kontamination mit besonderen Keimen (z.B. MRSA) muss das SLK Chair®-Sitzkissen für den Transport mit entsprechendem Desinfektionsmittel (z.B. Polyalkohol) vordesinfiziert und verpackt sein.

Es ist darauf zu achten, dass das SLK Chair®-Sitzkissen von außen gut kenntlich gemacht und ein entsprechendes Anschreiben (gut sichtbar) beigefügt wird.

Ein Hygieneplan (Merkblatt) über die Reinigung der SLK®-Produkte kann auch separat in unserer Servicestation in Dortmund angefordert werden.

Die SLK® Vertriebs-GmbH empfiehlt, das System mindestens alle 2 Jahre einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen. Im Rahmen dieser Kontrolle wird das System chemothermisch aufbereitet, technisch überprüft und der innenliegende Luftfilter ausgetauscht.

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Wiederaufbereitung des SLK Chair®-Sitzkissens erhalten Sie im SLK®-Hygiene Center.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unsere Servicestation in Dortmund.

5. TECHNISCHE PROBLEME

Alle reparatur- und/oder wartungsbedingten Arbeiten am Aggregat dürfen nur von der Firma SLK® oder einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

6. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schutzklasse/Gruppe I - Typ BF

nicht geschützt gegen Eindringen von Wasser;
mögliche Explosionsgefahr bei Benutzung in Gegenwart von leicht entzündlichen Narkosemitteln

Gerätegruppe nach MPG I

Aggregat

Höhe: 25 cm
Breite: 13 cm
Tiefe: 10 cm
Gewicht: 1,2 kg
Stromversorgung: 230 Volt - 50 Hz - 10 Watt

Auflage

Tiefe: 45 cm
Breite: 45 cm
Zellenhöhe: 12 cm
Gewicht: 1,1 kg

SLK VERTRIEBSGESELLSCHAFT mbH

Lindenhorster Straße 38-40 · 44147 DORTMUND
Telefon +49(0)231 -92 53 60 -0 · Fax +49(0)231 -92 53 60 29

Potsdamer Straße 12a · 14513 TELTOW/ b. BERLIN
Telefon +49(0)3328 -3 31 56 -0 · Fax +49(0)3328 -3 31 56 11

www.slk-gmbh.de