

Empfohlene Geräteeinstellungen

zur Therapie mit Apparativer Intermittierender Kompression (AIK)*



SLK Vertriebs GmbH
Lindenhorster Str. 38-40
44147 Dortmund
Tel. 0231/ 92 53 60 -0
Fax 0231/ 92 53 60 -29

Für Patienten mit venöser Erkrankung, z.B. chronisch venöser Insuffizienz, gilt:

- ✓ mit niedrigen Drücken (30-40 mmHg) beginnen und langsam, je nach Wohlbefinden, steigern bis ca. 60-70 mmHg
- ✓ die Therapiezeit sollte mit ca. 10 Min. gestartet werden und je nach Wohlbefinden gesteigert werden (bis ca. 20-30 Min.)
- ✓ die Therapie sollte im Idealfall 3 mal täglich angewandt werden

Für Patienten mit Lymphödem gilt:

- ✓ den Therapiedruck von 40 mmHg nicht überschreiten
- ✓ die Therapiezeit mit ca. 10 Min. starten und je nach Wohlbefinden steigern bis ca. 30-40 Min.
- ✓ die Therapie sollte im Idealfall 3 mal täglich angewandt werden

Für Patienten mit arterieller Erkrankung, z.B. pAVK, gilt:
(nur mit SLK PulsePress 3 Pro oder PulsePress Multi 12)

- ✓ mit niedrigen Drücken (30-40 mmHg) beginnen und langsam, je nach Wohlbefinden, steigern bis ca. 60-70 mm/ hg
- ✓ die Therapiezeit mit ca. 10 Min. starten und je nach Wohlbefinden steigern bis ca. 30-40 Min.
- ✓ die Therapie sollte im Idealfall 3 mal täglich angewandt werden
- ✓ die Belüftungszeit ist kurz zu wählen (5-15 Sek.) und die Entlüftungszeit sollte ca. 60 Sek. betragen

Grundsätzlich gilt:

Bei Schmerzen während der Behandlung ist die Therapie unverzüglich abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

*** Die hier aufgeführten Parameter sind Empfehlungen vom Hersteller. Die Entscheidung über Therapiedrücke und Behandlungszeit/ -dauer trifft immer der behandelnde Arzt.**