

für den Maximal-Lasttest
als Teil der Lifterwartung



Gewichtetrolley
ohne Last



mit Last



aufgehängt



- für die Funktionsprüfung von Patientenliftern mit Maximallast nach EN 10535 (Anhang B 1)
- Die Anschlaghöhe lässt sich bei dem Gewichtetrolley einfach auf Ihren Patientenlifter anpassen, dadurch wird der gesamte Hebebereich bei der Prüfung abgedeckt
- für fast alle gängigen Lifter geeignet

Gewichtetrolley

Maximallast: 220 kg

Artikel-Nr.: 5470

Technische Daten

Material:

- pulverbeschichtetes Stahlgestell
- bremsbare Rollen 75 Ø

Lieferumfang

- Gestell mit Rollen ohne Gewichte
- Zugdeichsel
- Bolzen mit SL Sicherung

So funktioniert es:

Sie kaufen bei uns den Gewichtetrolley, bei unserem Lieferanten für Hantelscheiben ein Paket aus vier 20 kg Scheiben zum Vorteilspreis. Sie benötigen insgesamt neun 20 kg Scheiben um Ihren Lifter zu prüfen. Die Scheiben können im Kofferraum eines PKW oder Lieferfahrzeugs verteilt transportiert werden.

Vor Ort stellen Sie den Trolley an eine Stelle, von der aus der Patientenlifter ohne Stufen erreichbar ist. Es kann vorkommen, dass es einfacher ist den Patientenlifter zu den Gewichten zu bringen als umgekehrt.

Öffnen Sie die SL Sicherung zwischen innerem und äußerem Rohr und entnehmen Sie den 10 mm Bolzen und anschließend das innere Rohr und legen Sie diese Bauteile zur Seite.

Stapeln Sie die Anzahl benötigter Hantelscheiben auf dem Mittelrohr des Gewichtetrolleys auf. Beachten Sie dabei die Maximallast auf dem Typenschild des Patientenlifters. Bei SLK Blue Flyer Compact sind dies 160 kg, bei SLK Blue Flyer Plus und SLK Flyer Plus sind es 180 kg.

Ist die Maximallast des Patientenlifters durch Hantelscheiben erreicht führen Sie das innere Rohr wieder in das äußere Rohr ein und befestigen es an der oberen Bohrung am CSP Ihres Patientenlifters. Fahren Sie den Patientenlifter in die unterste Position und stecken Sie den 10 mm Bolzen in die nächste passende Bohrung durch beide Rohre hindurch. Sichern Sie den Bolzen mit der SL Sicherung.

Nach erfolgter Sichtprüfung des Patientenlifters ohne Beanstandungen können Sie nun einen kompletten Hebezyklus ausführen. Halten Sie bei der Prüfung den Hebebereich frei und begeben Sie sich nicht unter die angehängte Prüflast! Dokumentieren Sie diese Prüfung mit Datum und Prüfer im Wartungsplan und machen Sie zusätzlich Fotos.

Gewichtetrolley für über 220 kg in Vorbereitung.

Als unser Kunde bekommen Sie einen Code von unserem Lieferanten für einen Preisnachlass von 5 % auf die Hantelscheiben.

Als unser Kunde erhalten Sie einen Code von unserem Lieferanten SCSports. (www.scsports.de)

Dieser Code lautet: **SLKGMBH**

Mit diesem Code erhalten Sie einen Preisnachlass von 5 % auf die **Hantelpakete**.

Hantelscheibenpaket Artikel-Nr.: I0002535 (4 x 20 kg)

Einfach die Artikelnummer in die Suchfunktion einfügen.

Es kann aber problemlos eine weitere einzelne 20 kg Scheibe dazu geordert werden.

20 kg Scheibe Artikel-Nr.: I0001814