

SLK Gewichtetrolley 220 kg

für den Maximal-Lasttest als Teil der Lifterwartung



MADE
IN
GERMANY

KG
220



ohne Last



aufgehängter
Zustand mit Last

Fakten

- max. Gewicht: 220 kg
- für die Funktionsprüfung von Universalliftern mit Maximallast nach EN 10535 (Anhang B1)
- Die Anschlaghöhe lässt sich bei dem SLK Gewichtetrolley einfach auf den Patientenlifter anpassen, dadurch wird der gesamte Hebebereich bei der Prüfung abgedeckt
- für fast alle gängigen Lifter geeignet

Material / Service

- pulverbeschichteter Stahlgestell
- bremsbare Rollen 75 ø mm, kugelgelagert

Garantie

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Lieferumfang

- Gestell mit Rollen **ohne Gewichte**
- Zugdeichsel
- Schäkel
- Bolzen mit SL-Sicherung

So funktioniert es:

Sie kaufen bei uns den Gewichtetrolley, und besorgen sich insgesamt neun 20 kg Hantelscheiben um Ihren Lifter zu prüfen. Die Scheiben können im Kofferraum eines PKW oder Lieferfahrzeugs verteilt transportiert werden.

Vor Ort stellen Sie den Trolley an eine Stelle, von der aus der Patientenlifter ohne Stufen erreichbar ist. Es kann vorkommen, dass es einfacher ist den Patientenlifter zu den Gewichten zu bringen als umgekehrt.

Die SL-Sicherung zwischen dem inneren und dem äußeren Rohr öffnen und den 10 mm Bolzen und anschließend das Innenrohr herausnehmen und beiseite legen.

Stapeln Sie die benötigte Anzahl von Hantelscheiben auf das Mittelrohr des Gewichtswagens.

Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit auf dem Typenschild des Patientenlifters.

Bei unseren Modellen wie z.B. SLK Carry Compact beträgt diese 160 kg, bei SLK Carry 185 Classic und SLK Carry 185 Pro, Pro L sind es 185 kg.

Ist die Maximallast des Patientenlifters durch Hantelscheiben erreicht führen Sie das innere Rohr wieder in das äußere Rohr ein und befestigen es an der oberen Bohrung am CSP Ihres Patientenlifters. Fahren Sie den Patientenlifter in die unterste Position und stecken Sie den 10 mm Bolzen in die nächste passende Bohrung durch beide Rohre hindurch. Sichern Sie den Bolzen mit der SL Sicherung.

Nach erfolgter Sichtprüfung des Patientenlifters ohne Beanstandungen können Sie nun einen kompletten Hebezyklus ausführen.

Halten Sie bei der Prüfung den Hebebereich frei und begeben Sie sich nicht unter die angehängte Prüflast! Dokumentieren Sie diese Prüfung mit Datum und Prüfer im Wartungsplan und machen Sie zusätzlich Fotos.



Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999
E-Mail: info@slk-gmbh.de
Internet: www.slk-gmbh.de
Revision: 003 - 8/2024

 **@SLK Medizintechnik**

 **slk_medizintechnik**