



Wellell Group

Gebrauchsanweisung **SLK Aktivgurte**



Basis UDI-DI 426064753PL02000014B

SLK Aktivgurt Eco

SLK Aktivgurt

SLK Spezial Aktivgurt

**SLK Spezial Aktivgurt
mit Sitzschaukel**

Inhaltsverzeichnis

Begrüßung	4
Allgemeine Informationen	4
SLK Aktivgurte Modelle	5
Zubehör	5
Kompatibilität / geeignete Liftermodelle	5
Zweckbestimmung und Wiedereinsatz	6
Indikation	6
Kontraindikation	6
Anwendung im Nassbereich	7
Sicherheitshinweise	7
SLK Aktivgurt Überblick	8
Erläuterung der Symbole	9
Lieferumfang	10
Checkliste vor jedem Einsatz	10
Anwendung Allgemeines	11
SLK Aktivgurt	11
SLK Aktivgurt Eco	11
SLK Spezial Aktivgurt Vorbereitung	12
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel Vorbereitung	13
Anwendung Anlegen des Gurtes	14
Anwendung Einhängen der Schlaufen	14
Anwendung Oberschenkelgurt	15
Anwendung Sitzschaukel	15
Anwendung Aufrichtvorgang	16
Aktivgurt mit Oberschenkelunterstützung	16
Aktivgurt mit Sitzschaukel	17
Anwendung Transfer	17
Anwendung Absetzvorgang	17
Anwendung Lösen des Gurtes	18
Anwendung Aufbewahrung des Gurtes	18
Maße und Artikel IDs	18

Größentabelle	19
Waschanleitung und Lagerbedingungen	20
Wartung	20
Wartungsplan	21
Verwendete Materialien / Technische Daten	22
Konformität / angewendete Normen	22
Gewährleistung / Garantie	22
Lebensdauer	22
Entsorgung	23
Notizen	23
Kontaktdaten	24

Begrüßung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause **SLK** entschieden haben. Es wurde von Fachleuten mit Sorgfalt entwickelt, getestet und im Einklang mit den geltenden Richtlinien und Normen hergestellt.

Die Firma **SLK** nutzt **über 80 Prozent selbst produzierten Grünstrom aus reiner Sonnenenergie** für Produktion, Chemothermische Aufbereitung, Service und den restlichen Energiebedarf. Sämtliche Arbeitsabläufe sind auf **maximale Effizienz zur Nutzung von Solarenergie** optimiert. Damit leistet das Unternehmen schon jetzt einen **signifikanten Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz**.

Allgemeine Informationen

Lesen Sie vor Benutzung des Produkts die gesamte Gebrauchsanweisung. So vermeiden Sie Fehler durch Informationsmangel.

Kapitel mit **hellblau** hinterlegten Überschriften sind hauptsächlich an den **Betreiber** (z. B. das Sanitätshaus) adressiert. Die **dunkelblau** hinterlegten Überschriften richten sich an den **Anwender** (z. B. die Pflegekraft). **Mittelblau** steht für **beide Adressaten**.

Orangefarbene Inhalte sind besonders sicherheitsrelevant.

Die **SLK Aktivgurte** sind für Kinder, Erwachsene, leichte oder schwere Patienten geeignet. Sie eignen sich für den Einsatz im **Homecare-Bereich**, in **Pflegeinstitutionen** oder **Kliniken**. Mit den entsprechenden **SLK Aktivliftern** kombiniert, sind sie zum **schonenden Positionswechsel** durch eine Pflegekraft geeignet und auch **im Nassbereich einsetzbar**.

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir besonderen Wert auf **Anwenderfreundlichkeit**. Das gilt natürlich auch für diese Gebrauchsanweisung, die einer kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung unterliegt. Deshalb sollten Sie stets die **aktuelle Version** für Ihr Produkt benutzen, die Sie auf unserer Internetseite **slk-gmbh.de** finden.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende **SLK Liftergurte**:

SLK Aktivgurt Eco	Größe M/L
SLK Aktivgurt	Größe S - XXL
SLK Spezial Aktivgurt	S - L
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	Größe S - XXL

Werden in dieser Gebrauchsanweisung Angaben gemacht, die für alle diese Modelle gelten, wird allgemein von **SLK Aktivgurt** geschrieben.

Alle SLK Liftergurte sind Medizinprodukte und dürfen nur von medizinischem Fachpersonal oder ausgebildeten Anwendern eingesetzt werden.

Zubehör

Zusammen mit den **SLK Aktivgurten** können Sie folgendes Zubehör optional verwenden:

SLK Verlängerungsschlaufen	Artikel-ID 5719
-----------------------------------	------------------------

Die **SLK Verlängerungsschlaufen** können verwendet werden, um bei Bedarf die vorhandenen Gurtschlaufen zu verlängern und somit mehr Einhängemöglichkeiten zu schaffen.

Kompatibilität / geeignete Liftermodelle

Die **SLK Aktivgurte** sind für alle **SLK Aktivlifter** bestimmt. Außerdem ist die Anwendung an Liftsystemen anderer Hersteller möglich, wenn diese in unserer Kompatibilitätserklärung aufgeführt sind. Eine aktuelle Kompatibilitätserklärung finden Sie auf der SLK-Internetseite **www.slk-gmbh.de** im Downloadbereich.

Zweckbestimmung und Wiedereinsatz

Die **SLK Liftergurte** sind Medizinprodukte der Klasse 1 nach der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

Zweck dieser Liftergurte ist die **schonende Aufnahme** des Patienten mithilfe eines Patientenliftsystems zur **Unterstützung der Pflegekraft beim Anheben und Umsetzen** von Patienten. **Sie dienen nicht zur Patientenfixierung.**

Alle **SLK Liftergurte** sind **wiederverwendbare Medizinprodukte**. Sie können nach erfolgter Reinigung und Wartung erneut bei einem anderen Patienten eingesetzt werden.

Indikation

Die **SLK Liftergurte** können bei Mobilitätsverlust und Einschränkungen angewendet werden, wenn zum Anheben und Umsetzen des Patienten ein Patientenliftsystem eingesetzt wird.

Mit dem **SLK Aktivgurt Eco** können Patienten bis zu **185 kg** Körpergewicht gehoben und umgesetzt werden.

Alle anderen **SLK Aktivgurte** können bis zu einem Patientengewicht von **320 kg** eingesetzt werden. Hierbei ist auch die Maximallast des Liftsystems zu beachten. **Es ist immer die niedrigste Maximallast ausschlaggebend.**

Kontraindikation

Die Anwendung von Patientenliftern lässt Kräfte auf den Körper des Patienten einwirken, die nicht bei jedem Krankheitsbild vertragen werden. Nehmen Sie vor jeder Anwendung eines Patientenlifters eine kritische Betrachtung des Patienten und seines Zustandes vor. Fragen Sie im Zweifel den behandelnden Arzt.

Überschreitet das Gewicht des Patienten die angegebene Maximallast, darf der Liftergurt nicht eingesetzt werden.

Anwendung im Nassbereich

Die **SLK Aktivgurte** sind **für den Nassbereich**, wie z. B. die Toilette, **geeignet**, aber nicht unter der Dusche einsetzbar.

Sicherheitshinweise

- Die **SLK Liftergurte** dürfen **ausschließlich zu dem in der Zweckbestimmung angegebenen Zweck verwendet werden**. Sie sind nicht für das Anheben von Gegenständen freigegeben und kein Spielzeug. Bei Missachtung kann der Gurt beschädigt werden und es können Unfälle passieren.
- **Überschreiten Sie nicht die zulässige Maximallast**, Sie finden diese **Angabe auf den Typenschildern** des Liftergurt und des Lifters. **Die niedrigste Maximallast ist ausschlaggebend**. Bei Nichtbeachten kann der Liftergurt beschädigt werden und es kann zu Unfällen kommen.
- Überprüfen Sie vor jeder Anwendung des **SLK Liftergurt** seine Einsatzbereitschaft anhand der **„Checkliste vor jedem Einsatz“ (Seite 10)**. **Bei Auffälligkeiten benutzen Sie den Liftergurt nicht und wenden Sie sich umgehend an den Fachhandel**.
- Der **SLK Liftergurt** darf **nicht verändert oder manipuliert** werden. Veränderungen können zu Beschädigungen und zu Unfällen führen.
- Die **SLK Aktivgurte** sind für alle **SLK Aktivlifter** bestimmt. Die Verwendung an Liftern anderer Hersteller ist möglich, wenn diese in unserer Kompatibilitätserklärung aufgeführt sind. **(Seite 5)**
- Die **SLK Liftergurte** dürfen **nur an Aktifliftern mit Schlaufenaufnahme, keinesfalls an Liftern mit Clip-Aufnahme oder Seilklemmen verwendet werden**. Bei Verwendung von nicht-kompatiblen Systemen kann es zu Unfällen kommen.
- Führen Sie an Ihrem **SLK Liftergurt** regelmäßig die **halbjährliche Wartung** durch. Die Wartung und deren Dokumentation darf **nur durch geschultes Fachpersonal** durchgeführt werden.
- Das **Verpackungsmaterial** des Produkts muss von Kindern ferngehalten und fachgerecht entsorgt werden. Falsch angewendet kann es die Gesundheit von Kindern gefährden und zum Erstickungstod führen.

SLK Aktivgurt Überblick

Abgebildet ist das Modell SLK Aktivgurt in Größe M.
Durch uns vorbehaltene Änderungen und andere Modelle kann es zu Abweichungen von Texten und Abbildungen gegenüber Ihrem Produkt kommen.

Liftermgurt Außenseite



Liftermgurt Innenseite/Patientenseite



Oberschenkelgurt



Sitzschaukel



Erläuterung der Symbole



Hersteller ist **SLK Vertriebsgesellschaft mbHw**

Herstellungsdatum (z. B: **05/2022**)

SN / Barcode

Seriennummer Beispiel: 5099B00001



Medizinprodukt

mit Europäischer Konformitätserklärung

max. xxx kg

Maximallast



Gebrauchsanweisung beachten

REF

Artikel-ID

SIZE

Größe



Waschbar bis 70° C



Nicht Bleichen



Nicht Bügeln



Nicht Trockenreinigen / nicht chemisch reinigen



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Achtung!

Setzen Sie keine beschädigten/abgenutzten Gurte ein!

SLK Aktivgurt		 max. 320 kg	SLK Vertriebsgesellschaft mbH Am Herdlicksbach 18 D-45731 Waltrop www.slk-gmbh.de +49 (0)231-92 53 60-0 info@slk-gmbh.de	Setzen Sie keine beschädigten/ abgenutzten Gurte ein!
SN <hr/>	REF 5101	SIZE M	Material: Oberstoff: 100 % Polyester Schlaufen: 100 % Polyester Polsterung: 100 % Polyethylen	

Lieferumfang



- **SLK Aktivgurt**
(je nach Modell mit Sitzschaukel/-gurt)
- **Produktzettel**
- **Gebrauchsanweisung**


Checkliste vor jedem Einsatz

Vor jedem Einsatz sollte eine Sichtkontrolle durchgeführt werden. Mit minimalem Zeitaufwand können Sie sich so vor jedem Einsatz vom sicheren Zustand des **SLK Liftergurtes** überzeugen. Das wird sowohl Ihre als auch die Sicherheit des Patienten erhöhen.

1. Ist der Liftergurt und das Zubehör **ohne Risse und Schnitte**?
2. Sind die **Nähte unbeschädigt**?
3. Sind die **Schlaufen intakt** und **frei von Scheuerstellen**?

Benutzen Sie den Liftergurt nur wenn alle Punkte in Ordnung sind. Bei Abweichungen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Der **SLK Aktivgurt** hat **Schlaufen mit mehrere Einhängemöglichkeiten, die farblich unterschiedlich gekennzeichnet sind.** (Abb. 1)

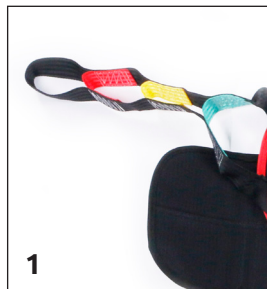

- Verwenden Sie **nach Möglichkeit rechts und links gleichfarbige Schlaufen** und hängen Sie diese **nicht verdreht** ein.

- Durch **verschiedenfarbige Gurtkennzeichnungen** ist ein schnelles Erkennen der Größen möglich. (Abb. 2) Die **Größentabelle** finden Sie auf **Seite 19**.



- Achten Sie darauf, dass das **Logo** auf der Rückseite des Gurtes **mittig** ausgerichtet ist bzw. die Gurtenden vorne gleich lang sind. (Abb. 3)

- Die **beiden Klettverschluss-Seiten** des Bauchgurtes müssen **mindestens zu zwei Drittel** übereinanderliegen. (Abb. 4)




- Das **Klettband darf nicht** am Gurt **scheuern**. Ansonsten kann es zu starken Materialabnutzungen kommen, was die Lebensdauer des Gurtes negativ beeinträchtigt.

- Beachten Sie **vor Anlegen** des **SLK Aktivgurtes** die **Vorbereitung** des verwendeten Aktivgurt-Modells. (Seite 12 und 13)

- Beachten Sie immer die **Gebrauchsanweisung** des verwendeten Liftersystems.

- **Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 7.**

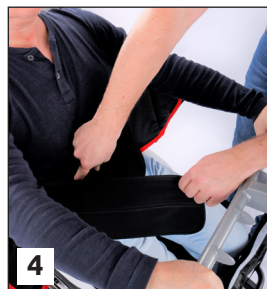

Aktivgurt Eco

Der **SLK Aktivgurt Eco** ist ein Aufrichtgurt, der für dual- und nach oben ziehende Lifter geeignet ist. Er ist verwendbar mit allen **SLK Aktivliftern**.



Der **SLK Aktivgurt Eco** hat keinen Klett-Bauchgurt. Er eignet sich besonders für Patienten, die geistig und körperlich in der Lage sind beim Aufrichtvorgang aktiv mitzuhelfen. (*Abb. 5*)

SLK Aktivgurt

Der **SLK Aktivgurt** ist ein **Aufrichtgurt**, der für **dual- und nach oben ziehende Lifter** geeignet ist. Er ist verwendbar mit **allen SLK Aktivliftern**.



Der **SLK Aktivgurt** wird mit dem Bauch-Klettverschluss im Bereich der Lendenwirbelsäule eng anliegend fixiert. So kann er nicht so leicht verrutschen und gibt dem Patienten ein sicheres Gefühl. (*Abb. 6*)

SLK Spezial Aktivgurt

Vorbereitung

Der **SLK Aktivgurt Spezial** ist ein **Aufrichtgurt mit Oberschenkelunterstützung**, der für **dual- und nach oben ziehende Lifter** geeignet ist. Er ist verwendbar mit **allen SLK Aktivliftern**.



Lösen Sie die Seite des unterstützende Oberschenkelgurt mit **Klickverschluss** und bringen Sie das Band auf **maximale Länge**.

Achten Sie darauf, dass Sie **nicht versehentlich auf den Verschluss treten** und der Gurt nirgendwo hängen bleibt. Legen Sie den Gurt nun so an, wie ab **Seite 14** beschrieb. (**Abb. 7**)

SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel Vorbereitung

Der **SLK Aktivgurt Spezial mit Sitzschaukel (Abb. 8)**, ist ein **Aufrichtgurt mit Gesäßunterstützung**, der besonders für **dual-ziehende Lifter** geeignet ist. Er ist verwendbar mit **allen SLK Aktivliftern**, außer dem **SLK Easylev**.



Heften Sie die **Sitzschaukel** mit dem Klettverschluss **vor dem Anlegen des Gurtes** mittig auf die **Rückseite** des Aktivgurts. Die **Klickverschlüsse** sollten **geschlossen** sein, die **Bänder weit gestellt**.

Anwendung


Anlegen des Gurtes



- Zum Anlegen des Gurtes sollte der Patient sich leicht **nach vorne beugen**. (*Abb. 9*)
- Beim Anlegen des Gurtes befindet sich das **Logo außen** und die **Achselpolster oben**.
- Der Gurt sollte etwa in **Höhe des Lendenwirbelbereichs** anliegen. Die **Achselpolster** befinden sich **nicht** dicht unter den Achseln, sondern haben noch etwas Abstand, da der Gurt unter Belastung noch nach oben rutscht. (*Abb. 10*)
- Schließen Sie nun den **Klettverschluss des Bauchgurtes** (außer **SLK Aktivgurt Eco**) so, dass der Klettverschluss komplett überlappt. Ansonsten können Beschädigungen am Gurt entstehen.

Anwendung

Einhängen der Schlaufen

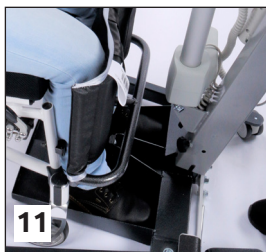

- Positionieren Sie den Aktivlifter **nahe vor** der Sitzgelegenheit des Patienten. Die **Füße** des Patienten **auf das Trittbrett** stellen. (*Abb. 11*).
- Am Lifterarm befinden sich innerhalb der Griffe jeweils zwei Metalllaschen. Hängen Sie nun die Schlaufen so ein, dass sich rechts und links **gleichfarbige Schlaufen** zwischen diesen Laschen befinden. (*Abb. 12*)
- **Beachten Sie hierbei auch immer die Gebrauchsanweisung des verwendeten Aktivlifters.**

Beim **SLK Spezial Aktivgurt** wird die Gesäßunterstützung **erst dann** angeclipst, wenn der **Bauchgurt geschlossen** ist und die **Schlaufen eingehängt** sind.

- Bringen Sie das Gurtband auf **maximale Länge**.
- Führen Sie den Gurt **von außen nach innen** unter dem ersten Oberschenkel durch (**Abb. 13**)
- und dann weiter unter dem zweiten. Achten Sie darauf, dass der Gurt **nicht verdreht** wird. (**Abb. 14**)
- Clipsen Sie nun den Klickverschluss ein und **ziehen** Sie den Gurt mithilfe des Verstellsystems so **stramm**, so, dass das Gurtband unter den Oberschenkeln **etwas unterhalb des Gesäßes** liegt. (**Abb. 15**)
- **Am Anfang** des Aufrichtvorgangs **kann** die Position bei Bedarf noch etwas **korrigiert** werden.



Beim **SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel** kletten Sie die Sitzschaukel vor Anlegen des Gurtes hinten mittig auf der Außenseite des Gurtes fest. Verlängern Sie die Bänder auf beiden Seiten und clippen Sie sie dann an. (**Abb. 16**) Legen Sie den Gurt nun an, wie unter **"Anlegen des Gurtes"** (**Seite 14**) beschrieben.



Beim Anlegen von SLK Aktivgurten mit Sitzschaukel beachten Sie folgende Reihenfolge:

- Den Gurt wie auf *Seite 14* beschrieben anlegen.
- Dann den Patienten etwas liften.
- Jetzt die Sitzschaukel richtig positionieren. (*Seite 17*)
- Den Patienten wieder ablassen.
- Nun die Bänder stramm ziehen.
- Erst jetzt mit dem eigentlichen Liftvorgang beginnen.

Anwendung

Aufrichtvorgang



- Der Patient **hält sich** nach Möglichkeit an den **Griffen** des Aktivhebearms **fest**. (*Abb. 16*)
- **Weisen Sie** den Patienten auf den Aufrichtvorgang **hin**.
- Bleiben Sie **während des Aufrichtvorgangs** in **Augenkontakt**.
- **Drücken** Sie nun die **Aufwärtstaste** bis der Patient nicht mehr sitzt und ein **Freiraum zwischen der Sitzgelegenheit und dem Gesäß** entsteht.
- Kontrollieren sie den richtigen Sitz des Gurtes. Korrigieren Sie ggf. aber **lösen Sie auf keinen Fall den Klettverschluss des Bauchgurtes**. (Hierfür müsste der Patient zuerst wieder herunter gelassen werden.)



Aktivgurt mit Oberschenkelunterstützung

- Ist ein Gesäßgurt vorhanden muss dieser nun **in die richtige Position** gebracht werden. Sie befindet sich etwa zwischen Ende der Oberschenkel und Ansatz Po. (*Abb. 19*)

- Sitzt der Gurt in der richtigen Position, ziehen Sie **an beiden Seiten gleichmäßig stramm**. (Abb. 20)



Aktivgurt mit Sitzschaukel

- Die Sitzschaukelvorderkante sollte etwa im Bereich **zwischen Ende der Oberschenkel und Ansatz Po** liegen. (Abb. 21)
- Die Gurte der Schaukel **gleichmäßig festziehen**.



Nun kann der Aufrichtvorgang fortgesetzt werden **bis der Patient** bequem und **relativ aufrecht** auf dem Trittbrett **steht**.

Anwendung

Transfer

- Schieben Sie den Lifter an seinem **Schiebegriff** in Fahrtrichtung **vorwärts**. (Abb. 22)
- Behalten Sie den Patienten **im Blick**.
- Halten Sie die Transferwege **möglichst kurz**. Kontrollieren Sie **vorher** den Weg und **holen** Sie Rollstuhl /Toilettenstuhl **heran**.



Anwendung

Absetzvorgang

- Beim Absetzen in einem Rollstuhl/Toilettenstuhl, **bremsen** Sie diesen.
- Den Lifter so **nahe an die Sitzgelegenheit** schieben, dass die Beinrückseiten die Stuhlkante berühren. (Abb. 23)
- **Weisen sie den Patienten auf den Absetzvorgang hin** und **halten Sie ihn im Blick** beim Drücken der Abwärtstaste.



Anwendung

Lösen des Gurtes



- **Lösen** Sie den **Klettverschluss** des Bauchgurtes (wenn vorhanden).
- Ziehen Sie **zuerst** die **Sitzschaukel/das Gesäßband** nach hinten unter dem Gesäß hervor, dann den Gurt nach hinten oben heraus. Der Patient sollte sich möglichst dabei unterstützend nach vorne beugen. (**Abb. 24**)

Anwendung

Aufbewahrung des Gurtes



- Zur Aufbewahrung **schließen Sie den Klettverschluss** des Bauchgurtes, kletten Sie die Sitzschaukel an und **hängen** Sie den Gurt **über den Hebearm** des Lifters. (**Abb. 25**)
- Achten Sie darauf, dass **keine Clipse auf den Boden liegen** und die Bänder sich beim Schieben des Lifters nicht in den Rollen verfangen können.

Maße und Artikel IDs

SLK Gurte für Aktivlifter	Größe	Artikel-ID	Bauchumfang	Rückenbreite bis Mitte Achseln
SLK Aktivgurt Eco	M/L	5099	66 cm	42 cm
SLK Aktivgurt	S	5100	52 cm	35 cm
SLK Aktivgurt	M	5101	60 cm	37 cm
SLK Aktivgurt	L	5102	73 cm	47 cm
SLK Aktivgurt	XL	5103	78 cm	53 cm
SLK Aktivgurt	XXL	5104	81 cm	65 cm
SLK Spezial Aktivgurt	S	5105	52 cm	35 cm
SLK Spezial Aktivgurt	M	5106	60 cm	42 cm
SLK Spezial Aktivgurt	L	5107	73 cm	47 cm
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	S	5188	52 cm	35 cm
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	M	5189	60 cm	45 cm
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	L	5190	73 cm	47 cm
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	XL	5191	78 cm	53 cm
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	XXL	5192	81 cm	65 cm

Körpergröße in cm

Gewicht in kg

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
15	XXS	XXS	XXS	XXS										
20	XXS	XXS	XS	XS	XS	XS								
25	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS							
30			S	S	S	S	S	S	M	M				
40			S	S	S	S	S	S	M	M	M			
50			M	M	M	M	S	S	M	M	M	M	M	M
60			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
70			M	M	M	M	M	M	L	L	L	M	M	M
80				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
90				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
100								L	L	L	L	L	L	L
110								XL	XL	XL	XL	L	L	L
120								XXL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
130								XXL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
140								XXL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
150								XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
160								XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
170								XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
180								XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
190									XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
200									XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
210									XXL	XXL	XXL	3XL	3XL	3XL
220									3XL	3XL	3XL	3XL	3XL	3XL
230									3XL	3XL	3XL	3XL	3XL	3XL
240									3XL	3XL	3XL	3XL	3XL	3XL
250									3XL	3XL	3XL	3XL	3XL	3XL
260									3XL	4XL	4XL	3XL	3XL	3XL
270									3XL	4XL	4XL	4XL	4XL	4XL
280										4XL	4XL	4XL	4XL	4XL
290										4XL	4XL	4XL	4XL	4XL
300										4XL	4XL	4XL	4XL	4XL
310										4XL	4XL	4XL	4XL	4XL
320										4XL	4XL	4XL	4XL	4XL

Waschanleitung und Lagerbedingungen


Beachten Sie die Hinweise auf dem **Typenschild**. **SLK Liftergurte** sind bis zu einer Temperatur von **70° C waschbar** und entsprechen somit den allgemein geltenden Hygienestandards.

Sie können den Gurt in einer **normalen Waschmaschine** mit handelsüblichem Waschmittel waschen. **Der Klettverschluss muss komplett geschlossen sein**. Trocknen Sie den Liftergurt hängend auf einer Wäscheleine, nicht im Wäschetrockner. **Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung**. Bei Nichtgebrauch lagern Sie den Gurt an einem trockenen Ort bei normaler Raumtemperatur.

Wartung

Der sichere Einsatz der **SLK Liftergurte** hängt ganz wesentlich von der regelmäßigen Durchführung der Wartung ab. Dabei können eventuelle Mängel oder Verschleißerscheinungen erkannt werden.

- Führen Sie an Ihrem **SLK Liftergurt** und **Zubehör regelmäßig** die **halbjährliche Wartung** durch und dokumentieren Sie diese.
- Die Wartung darf nur von **qualifiziertem Fachpersonal** ausgeführt und dokumentiert werden.
- Die Wartung muss auch **bei jedem Wiedereinsatz** durchgeführt und dokumentiert werden.

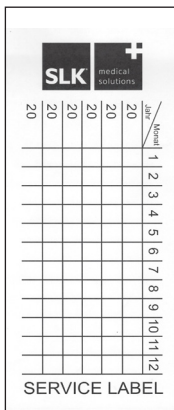

- Nehmen Sie den Liftergurt **nicht** wieder in Betrieb, wenn eine der Zeilen aus dem Wartungsplan **nicht mit O.K.** abgehakt werden kann. **Defekte bzw. verschlissene Liftergurte dürfen nicht mehr benutzt werden** und müssen sofort entsorgt werden.
- Den **Wartungsplan** finden Sie auf **Seite 21**.
- Drucken Sie zum Ausfüllen den **jeweils aktuellen Wartungsplan** von der **SLK-Internetseite www.slk-gmbh.de** aus. Sie finden ihn im Downloadbereich.
- Nach erfolgter Wartung **ServiceLabel** lochen oder mit einem waschfesten Stift kennzeichnen.



Wartungsplan

SLK Liftergurte

Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop
Telefon: +49 (0) 231 / 92 53 60 - 0
Internet: www.slk-gmbh.de

Modell : _____

Größe: _____

Zubehör: Verlängerungsschlaufen Wadenband

Seriennummer : _ _ _ _ _

Herstelldatum: _ _ / _ _

POS.	Gegenstand (Sichtprüfung)	OK	nicht OK	Bemerkungen
1	Kompatibilitätserklärung der Zubehör- und Gerätekombinationen vorhanden			
2	Gebrauchsanweisung vorhanden			
3	Typenschild und Servicelabel vorhanden und lesbar			
4	Keine Risse, Löcher oder starke Gebrauchsspuren am Gewebe oder den Gurtschlaufen (bzw. den Verlängerungsschlaufen) vorhanden			
5	Keine gerissenen, abgenutzten oder aufgelösten Nahtstellen sichtbar			
6	Keine Verformung durch Wärmeeinflüsse			
7	Keine Schnitte im Gewebe			
8	Keine Verschöbung der Gurtschlaufen			
9	Klett- und Puffgurte im einwandfreien Zustand (wenn vorhanden)			
10	Sitzschaukel inkl. Verschlüsse im einwandfreien Zustand (wenn vorhanden)			

Für die Dokumentation aktuellen Wartungsplan von der SLK-Internetseite verwenden!

Der Liftergurt/das Zubehör kann weiter verwendet werden. (Das Servicelabel wurde gekennzeichnet.)

Der Liftergurt/das Zubehör darf nicht weiter verwendet werden. (Eine entsprechende Kennzeichnung wurde angebracht.)

Datum: _____

Unterschrift Prüfer: _____

Nächste Wartung: _____

Name in Druckbuchstaben: _____

Verwendete Materialien / Technische Daten

- Oberstoff:** 100% Polyester
Schlaufen: 100% Polyester
Polsterung: 100% Polyethylen

Konformität

Die **SLK Liftergurte** sind Medizinprodukte der Klasse 1 nach der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

Die Konformitätserklärung wurde nach Abschnitt 2, Artikel 52, Absatz 7 erstellt und kann im Volltext von unseren Kunden jederzeit angefordert werden.

angewendete Normen

Alle **SLK Liftergurte** entsprechen der EN ISO 10535:2021.

Gewährleistung / Garantie

Die Gewährleistung und Garantie richtet sich nach unseren aktuellen Servicerichtlinien. Diese können von unseren Kunden jederzeit angefordert werden.

Lebensdauer

Lebensdauer der **SLK Liftergurte** beträgt bei sachgemäßer Anwendung **mindestens 500 Hebezyklen und maximal 4 Jahre ab Erstverwendung**. Sie **endet spätestens mit auftretenden Verschleißerscheinungen**.

Die Liftergurte dürfen vor der Erstanwendung **max. 5 Jahre** gelagert

werden. Hierbei sind folgende Lagerbedingungen zu beachten:

- **Die Gurte müssen originalverpackt sein.**
- **Die Gurte dürfen nur trocken und bei normaler Raumtemperatur gelagert werden.**
- **Der Lagerplatz muss frei von Sonneneinwirkung sein.**

Entsorgung

Die **SLK Liftergurte** können im Hausmüll entsorgt werden.

Notizen

we lift you up



Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 231 - 92 53 60 - 0
Telefax: +49 (0) 231 - 92 53 60 - 29
E-Mail: info@slk-gmbh.de
Internet: www.slk-gmbh.de

Version: 2.4
Stand: 02/2024
Freigegeben von: QMB

**Bitte kontaktieren Sie als
Endverbraucher Ihren Zulieferer.**

 @SLK Medizintechnik

 slk_medizintechnik

#workgreen

Gebrauchsanweisung Artikel-ID 8296

Besuchen Sie unsere Internetseite www.slk-gmbh.de.

Im Downloadbereich finden Sie die aktuelle Version dieser Gebrauchsanweisung.