

# SLK Gewichtetrolley 220 kg

für den Maximal-Lasttest als Teil der Lifterwartung



MADE  
IN  
GERMANY

KG  
220



ohne Last



aufgehängter  
Zustand mit Last

## Fakten

- max. Gewicht: 220 kg
- für die Funktionsprüfung von Universalliftern mit Maximallast nach EN 10535 (Anhang B1)
- Die Anschlaghöhe lässt sich bei dem SLK Gewichtetrolley einfach auf den Patientenlifter anpassen, dadurch wird der gesamte Hebebereich bei der Prüfung abgedeckt
- für fast alle gängigen Lifter geeignet

## Material / Service

- pulverbeschichteter Stahlgestell
- bremsbare Rollen 75 ø mm, kugelgelagert

## Garantie

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

## Lieferumfang

- Gestell mit Rollen **ohne Gewichte**
- Zugdeichsel
- Schäkel
- Bolzen mit SL-Sicherung

## So funktioniert es:

Sie kaufen bei uns den Gewichtetrolley, und besorgen sich insgesamt neun 20 kg Hantelscheiben um Ihren Lifter zu prüfen. Die Scheiben können im Kofferraum eines PKW oder Lieferfahrzeugs verteilt transportiert werden.

Vor Ort stellen Sie den Trolley an eine Stelle, von der aus der Patientenlifter ohne Stufen erreichbar ist. Es kann vorkommen, dass es einfacher ist den Patientenlifter zu den Gewichten zu bringen als umgekehrt.

Öffnen Sie die SL Sicherung zwischen innerem und äußerem Rohr und entnehmen Sie den 10 mm Bolzen und anschließend das innere Rohr und legen Sie diese Bauteile zur Seite.

Stapeln Sie die Anzahl benötigter Hantelscheiben auf dem Mittelrohr des Gewichtetrolleys auf. Beachten Sie dabei die Maximallast auf dem Typenschild des Patientenlifters. Unsere Modelle wie z.B. SLK Carry Compact sind dies 160 kg, bei SLK Carry 185 Classic und SLK Carry 185 Pro, Pro L sind es 185 kg.

Ist die Maximallast des Patientenlifters durch Hantelscheiben erreicht führen Sie das innere Rohr wieder in das äußere Rohr ein und befestigen es an der oberen Bohrung am CSP Ihres Patientenlifters. Fahren Sie den Patientenlifter in die unterste Position und stecken Sie den 10 mm Bolzen in die nächste passende Bohrung durch beide Rohre hindurch. Sichern Sie den Bolzen mit der SL Sicherung.

Nach erfolgter Sichtprüfung des Patientenlifters ohne Beanstandungen können Sie nun einen kompletten Hebezyklus ausführen.

Halten Sie bei der Prüfung den Hebebereich frei und begeben Sie sich nicht unter die angehängte Prüflast! Dokumentieren Sie diese Prüfung mit Datum und Prüfer im Wartungsplan und machen Sie zusätzlich Fotos.



**Wellell Group**

SLK Vertriebsgesellschaft mbH  
Am Herdicksbach 18  
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0  
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999  
E-Mail: [info@slk-gmbh.de](mailto:info@slk-gmbh.de)  
Internet: [www.slk-gmbh.de](http://www.slk-gmbh.de)  
Version: 1.2 - Stand: Januar 2023

 **@SLK Medizintechnik**

 **slk\_medizintechnik**